


# Test VivaDiag™ SARS-CoV2 Ag FIA



## PRELIEVO DEL CAMPIONE




TAMPONE NASALE

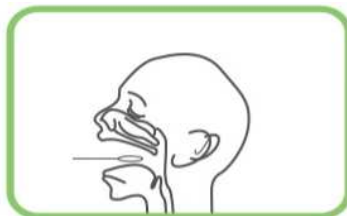

TAMPONE  
OROFARINGEO



TAMPONE  
NASOFARINGEO

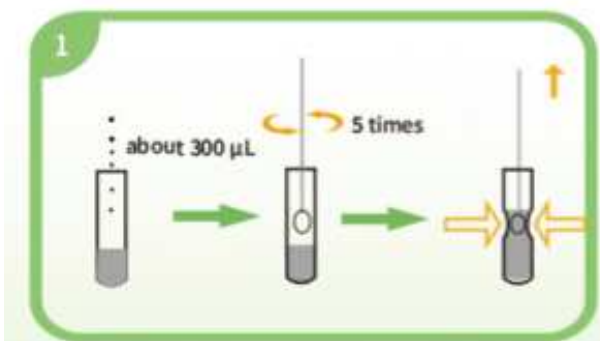

1) DISPENSARE IL LIQUIDO DI ESTRAZIONE  
NELLA PROVETTA

2) ESEGUIRE LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

3) INSERIRE IL TAMPONE NELLA PROVETTA


2) ROTEARE 5 VOLTE

4) PREMERE LA PROVETTA A LIVELLO DELLA  
TESTA DEL TAMPONE 3-4 VOLTE

RECUPERANDO IL MATERIALE IN PROVETTA

5) ESTRARRE IL TAMPONE COMPRIMENDO LA  
TESTA TRA LE PARETI

6) TAPPARE LA PROVETTA DI ESTRAZIONE

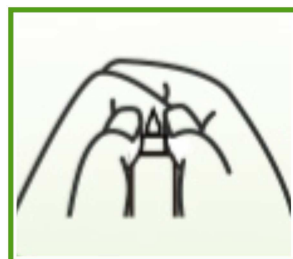

INVIARE IN LABORATORIO ANALISI NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE