



UTILIZZO ANALIZZATORE VIVADIAG PER TAMPONE RAPIDO AD IMMUNOFLUORESCENZA

---Specimen Collection

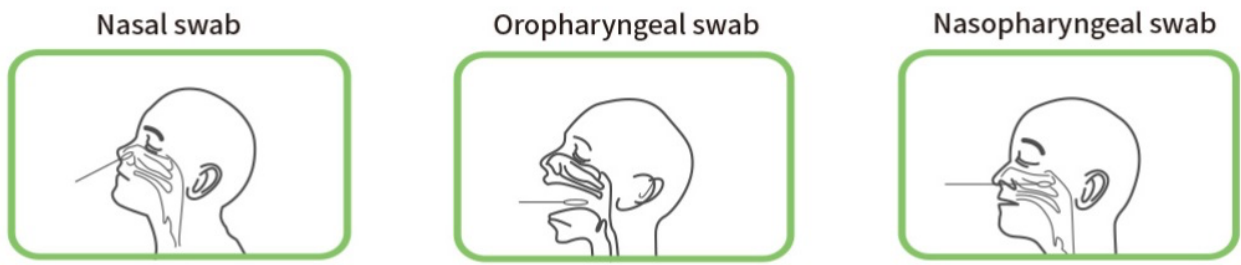

---Detection

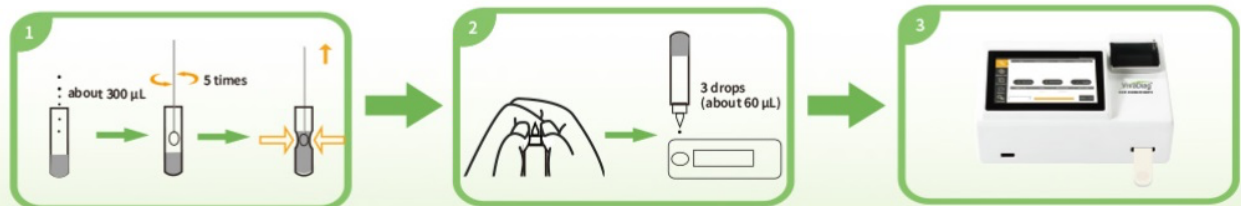

00	SE SPENTO , Accendere lo strumento dall'interruttore posto sul retro
0	Verificare che sia selezionato SINGLE TEST
1	Premere SAMPLE INFO per nominare il campione (vedi accanto - digitare codice identificativo e premere il tasto A)
2	Dispensare 3gtt nella card, inserirla QUI
3	Premere STANDARD TEST
4	Il risultato, terminato il periodo di incubazione di 15 minuti, uscirà sotto forma di scontrino QUI

