

L'importanza dell'aderenza

L'efficacia dei respiratori è garantita soltanto se i bordi del respiratore aderiscono perfettamente al viso. Quando l'aderenza viene a mancare, la protezione è compromessa in quanto l'aria contaminata penetra attraverso il bordo di tenuta.

Le istruzioni di indossamento riportate sotto devono essere seguite ogni volta che viene indossato un respiratore della linea 3M™ Aura™ 9300+.



Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.



Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore.



1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo



4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi

Modellare lo stringinaso in modo da ottimizzare l'aderenza intorno al naso e alle guance

Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo

Posizionare il respiratore in modo corretto su viso e testa



Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo, senza attorcigliarlo

Posizionare l'elastico inferiore sotto le orecchie, senza attorcigliarlo



3a. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso.



3b. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.



5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.



Il respiratore potrebbe non aderire perfettamente al viso se si modella lo stringinaso con una sola mano. Usare entrambe le mani



6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta

Se si usa un respiratore senza valvola - **espirare** con decisione

Se si usa un respiratore con valvola - **inspirare** con decisione

Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta

Se NON si riesce ad ottenere una perfetta tenuta NON ENTRARE nell'area contaminata e rivolgersi al proprio supervisore.