



# TAMPONE RAPIDO RICERCA COVID-19 Ag



## IDENTIFICARE LA PROVETTA

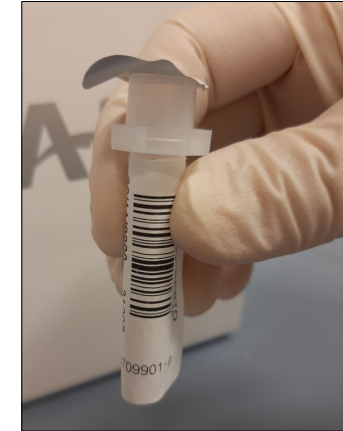

## PROCEDURA PREPARAZIONE CAMPIONE

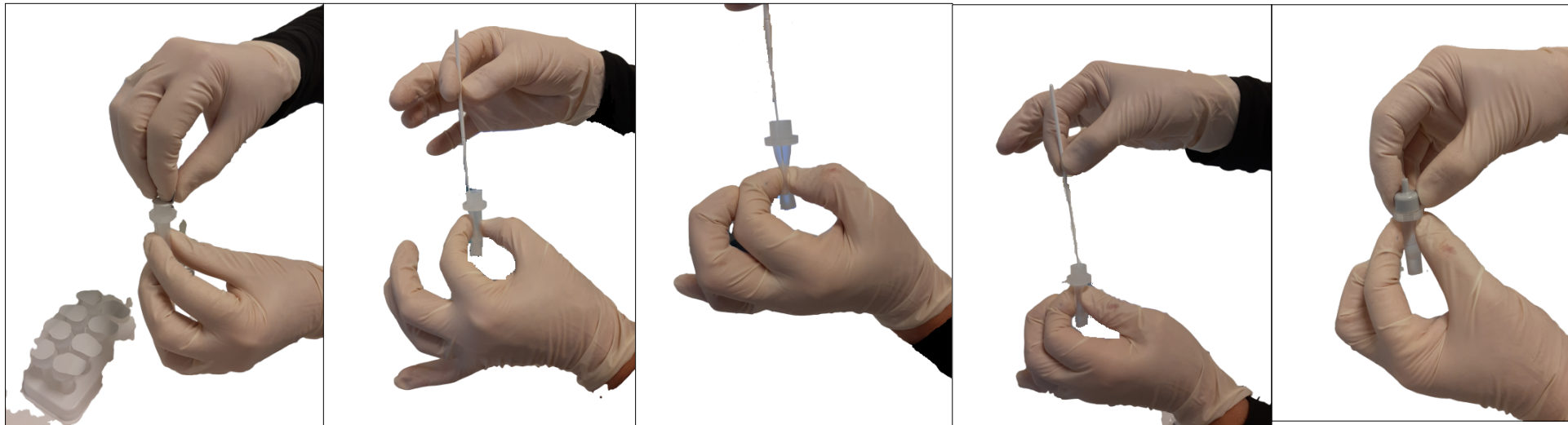

- 1) APRIRE LA PROVETTA DI ESTRAZIONE
- 2) ROTEARE IL TAMPONE 5 VOLTE SUL FONDO DELLA PROVETTA
- 3) COMPRIMERE PIU' VOLTE LA TESTA DEL TAMPONE PER RECUPERARE PIU' MATERIALE POSSIBILE
- 4) ESTRARRE IL TAMPONE COMPRIMENDO LE PARETI
- 5) METTERE IL TAPPO SULLA PROVETTA

**INVIARE IN LABORATORIO ANALISI NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE**