

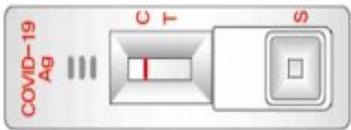
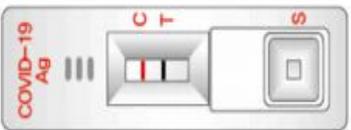
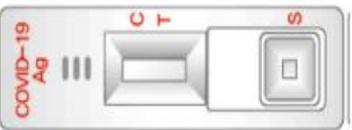


Procedura di dosaggio



<p>1 - Inserire il tampone con il campione e agitare per 5-10 volte</p>	<p>2 - Rimuovere il tampone mentre si preme delicatamente la testa del tampone</p>	<p>3 - Prendere un tappo del filtro dalla confezione e chiudere saldamente la provetta del diluente</p>	<p>4 - Capovolgere la provetta del diluente e strizzarla delicatamente per mettere 3-4 gocce (90-150 μL) nel pozzetto</p>	<p>5 - Leggeri i risultati in 5~8 minuti</p>
--	---	--	---	---

Interpretazione dei risultati

Negativo	Positivo	Invalido
 <p>Una linea Rossa "C"</p>	 <p>Linea Nera "T" e Linea Rossa "C"</p>	 <p>Non appare la linea "C" Ripetere il test</p>

POSITIVO PER QUALSIASI INTENSITA' DI COLORE IN LINEA T